


新型コロナウイルス (covid-19) 抗原検査キット (コロイド ゴールド 検査法)

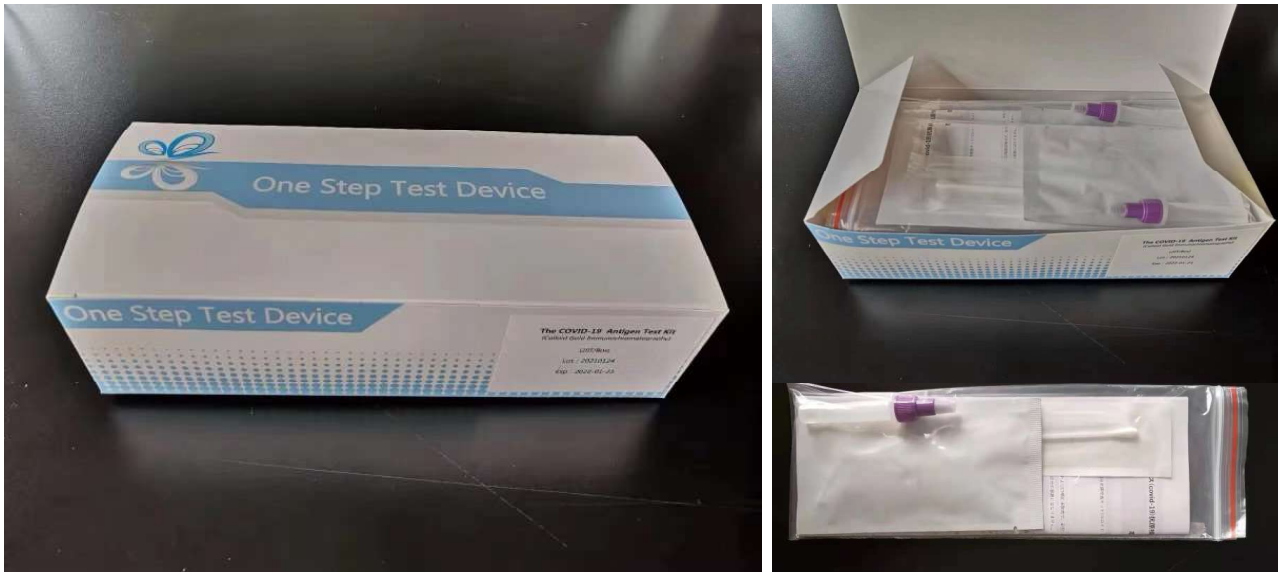

【製品名】

新型コロナウイルス (covid-19) 抗原検査キット (コロイド ゴールド 検査法)

【規格】

1 キット 1 人分

【効能効果】

このキットは、鼻咽頭採取および口咽頭採取式で、新型コロナウイルス (covid-19) の np 抗原を定性的に検査するために使用されるものであり、covid-19 の診断の根拠にはなりません。

【原理】

この試薬は、高度の特異的な抗体抗原反応原理とコロイド ゴールドマーカ免疫クロマトグラフィーの分析技術を用いて、膜上のテストエリア (T) に予め固定された (covid-19) - np 抗原モノクローナル抗体と、マーカーパッドにセットされた (covid-19-np 抗原モノクローナル抗体 - コロイドゴールド混合物を含む。検査時、サンプルは試薬のコロイドゴールド粒子と結合した新型コロナウイルス (covid-19) - np 抗原のモノクローナル抗体に反応し、この混合物は毛細管効果で上部に染み出る。陽性の場合、コロイドゴールド粒子標識抗体は、まずはクロマトグラフィーでサンプル中の (covid-19) - np 抗原ウイルスに結合し、その後、膜に固定された (covid-19) - np 抗原のモノクローナル抗体に結合することでテストエリア (T) に赤い帯が現れる。陰性であれば、テストエリア (T) に赤い帯は現れない。(covid-19) がサンプル中に存在するかどうかにかかわらず、コントロールライン (C) に赤い帯が現れます。コントロールライン (C) に現れる赤い帯は、サンプルが十分かどうか、クロマトグラフィーが正常かどうかを判断する基準であり、試薬の内部管理基準でもある。

【主要構成】

1、テストカード：：1 人分；2、希釈液：：1 本；3、無菌綿棒：1 本；4、説明書：1 部

【保存条件と有効期限】

4℃～30℃で保存し、冷凍は避ける。製品の有効期間は 12 ヶ月である。アルミホイル袋を開封した後、テストカードは 1 時間以内にできるだけ早く使用してください。

